
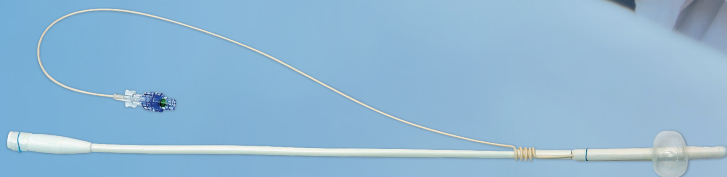


# CoreFlow<sup>®</sup>

URODYNAMISK INNOVATION FRÅN PROSTALUND




**CoreFlow<sup>®</sup> Soft Stent**  
Ny produkt som skapar en temporär  
urinpassage genom din prostata.



Ta med dig detta informationsblad om du är i kontakt med vården.

Produkten är relativt ny på marknaden, därför är det viktigt att ge information till dem du möter inom vården som ännu inte känner till produkten.

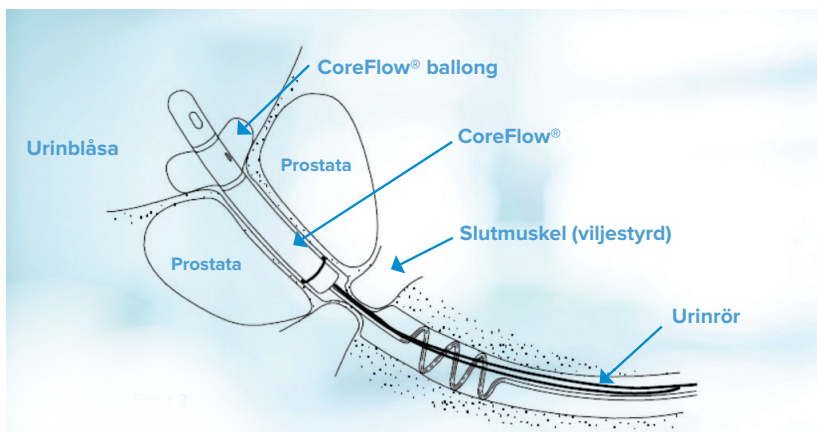


**CoreFlow® Soft Stent är en ny produkt som skapar en temporär urinpassage genom din prostata.**

CoreFlow® är en mjuk stent, gjort av silikon, som består av två delar. En främre och en bakre del, som kan separeras med en enkel manöver. Ur urinrörets mynning på penis löper en vit slang och en blå tråd, båda är delar av CoreFlow®.

Den vita slangen (som din läkare kanske gjort ett par knutar på) har använts för att fylla på vätska i CoreFlow® - ballongen. Ballongen håller CoreFlow® på plats i urinblåsan så att den inte ska glida ut.


**När borttagning av CoreFlow® skall ske:** klipper läkaren av den vita slangen, vätskan rinner ut ur ballongen och CoreFlow® kan avlägsnas.

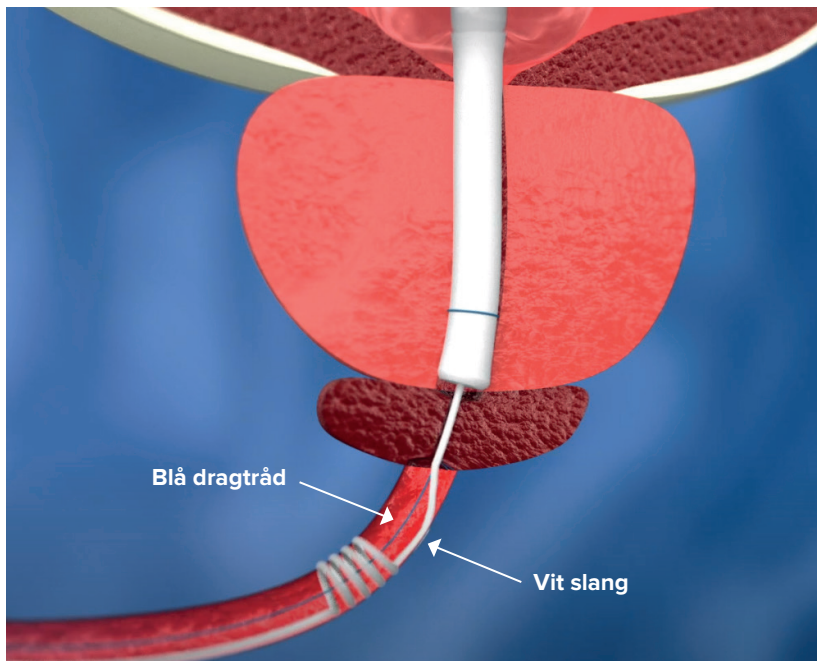

Om CoreFlow® skulle glida in i urinblåsan kan du vanligen återplacera den genom att lätt dra i den blå dragtråden.

Skulle du även med CoreFlow® ha svårigheter att kissa på egen hand kan du tömma urinblåsan genom att dra i den blå dragtråden. Urinflödet upphör när du släpper dragtråden. Om du efter detta fortfarande inte kan tömma urinblåsan ska du ta kontakt med vården.

Mer information om CoreFlow® Soft Stent hittar du på [www.coreflow.se](http://www.coreflow.se)

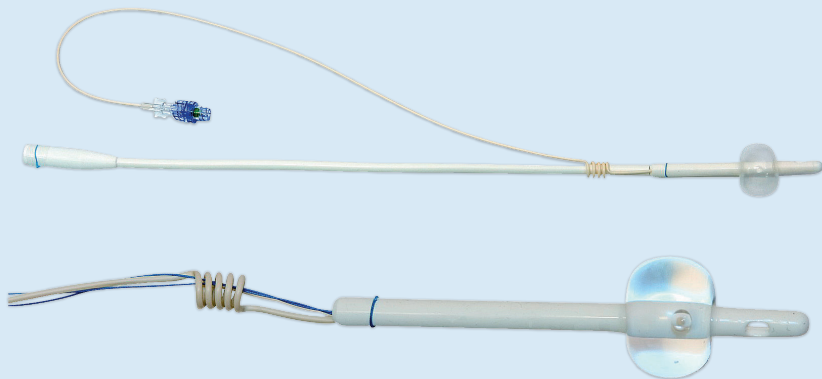

# CoreFlow<sup>®</sup>

URODYNAMISK INNOVATION FRÅN PROSTALUND

M-2023-011SE/1



ProstaLund AB | Scheelevägen 19 | SE-223 63 Lund,  
Sweden | [www.coreflow.se](http://www.coreflow.se) | [info@prostalund.com](mailto:info@prostalund.com)